

انجام کنترل کیفی تاریکخانه توسط تکنولوژیست رادیولوژی (روزانه - هفتگی)

- 1- ارزیابی چراغ safe light تاریکخانه (روزانه)
- 2- ارزیابی عدم نشت نور به داخل تاریکخانه
- 3- اطمینان از عدم نشت نور به داخل میز نگهداری فیلم
- 4- تعویض روزانه آب
- 5- شستشوی کلیه غلطکها و تانکهای داروی ظهور و ثبوت و آب به صورت هفتگی
- 6- چک نمودن سطح داروی داخل تانکها به صورت روزانه
- 7- بررسی وضعیت چهار چوب دستگاه
- 8- بررسی سینی جلوی دستگاه (به لحاظ نشت نور بعد از بسته شدن رو یه سینی)
- 9- بررسی و چک کردن کلیه غلطکهای و rack ها - سالم بودن چرخ دندها
- 10- بررسی وضعیت سطح داروی های داخل ظروف تقویت دارو
- 11- بررسی مسیر سیر کوله دارو، سر ریز آب و اطمینان از باز بودن تمامی مسیرها
- 12- سالم بودن پمپهای مکش دارو
- 13- سالم بودن ترموستات و چک نمودن دمای دارو
- 14- بررسی دمای خشک کن
- 15- در صورت عدم استفاده از پروسسور بیش از 4 روز می بایست دارو ها تخلیه گردد و سرویس هفتگی انجام شود.
- 16- در صورتی که از پروسسور بین 1 تا 3 روز استفاده نشود می بایست حداقل هر 6 ساعت یکبار دستگاه به مدت 10 دقیقه روشن و از آن فیلم عبور داده شود.
- 17- کنترل نهایی در خصوص عدم fog بودن فیلم ها